

VORBEREITUNG DER PUNKTIONSSTELLE GEMÄSS DEN HAUSINTERNEN RICHTLINIEN

Empfohlene Handhabung der Vasodrop® Safety




Halten Sie die Sicherheitsvenenverweilkanüle in der von Ihnen gewohnten Punktionstechnik. Entfernen Sie die Kanülenschutzkappe mit einer drehenden Ziehbewegung. Punktieren Sie die Vene in einem flachen Winkel.



Achten Sie auf das Befüllen der Rückflusskammer mit Blut.



Sobald der Blutrückfluss erkennbar ist, schieben Sie den Katheter langsam über die Punktionskanüle in die Vene vor. Bitte halten Sie die Punktionskanüle hierbei immer an der Halteplatte fest und nicht am Sicherheitsmechanismus!

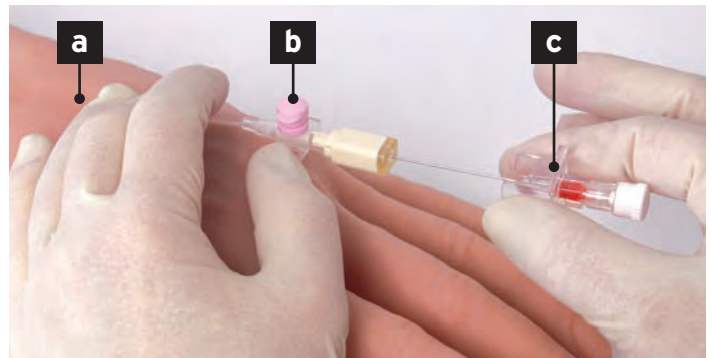

Befindet sich der Katheter in der Endposition, wird die Vene direkt oberhalb der Katheterspitze okkludiert (a), der Katheter fixiert (b) und die Punktionskanüle durch Ziehen an der Halteplatte (c) herausgezogen, bis sich der Sicherheitsmechanismus selbständig vom Katheter trennt. Entsorgen Sie die Sicherheitspunktionskanüle in einem geeigneten Kanülenabwurfbehälter.