



Laryngoskop-Griff und LED mit natürlichem Tageslicht

Validiert zum Gebrauch mit Sterrad®  
(50S, 100S, 200NX 100NX) Plasma-Systemen

**Spektrum des natürlichen Tageslichts gibt Farbe naturgetreu wieder und bietet so deutlichen und genauen Farbkontrast.**



### **Ein Licht, auf das man sich verlassen kann**

- Langlebiges, verlässliches LED mit mehr als 10.000 Stunden einheitlichem, beständigem Licht
- 2000 LUX für ideale Visualisierung bei Intubation
- Ergonomischer, rutschfester Silikongriff für maximalen Komfort
- Haltbare Edelstahlstruktur; komplett autoklavierbar
- Einmaliges, patentiertes Design für überlegene Leistung
- Kompatibel mit allen Spateln des Green System
- Angetrieben von zwei AA-Nickelzinkbatterien
- 5 Jahre Garantie

Kompatibel mit allen Laryngoskop - Spateln des Green System.  
Entspricht ISO 7376:2009.  
Freigabe: ISO 9001:2008, ISO 13485:2003  
FDA-registrierter Hersteller



# Maximieren Sie die Leistung Ihres Spatels mit unserem erstklassigen Griff

## Warum ist Truphateks LED-Quelle überlegen?

Truphatek hat die Farbtemperatur seiner LED-Quelle optimiert, um ein Lichtspektrum herzustellen, das mit natürlichem Tageslicht übereinstimmt. Mit einem hohen Color Rendering Index (CRI) bietet das GreenLED deutlichen und genauen Farbkontrast für überlegene Visualisierung bei Intubation.

## Muss das LED ab und zu ausgewechselt werden?

Nein, das LED steht 5 Jahre ab Herstellungsdatum komplett von Truphatek unter Garantie.

## Wie viele Intubationen können ausgeführt werden, bevor die Batterien ausgewechselt werden müssen?

Mindestens 300 Intubationen können mit einem Paar neuer AA-Nickeisenbatterien ausgeführt werden.

## Welche Batterien können mit dem GreenLED-Griff verwendet werden?

Nur Einweg-AA-Nickeisenbatterien. Lithium-Eisen-Disulfid und alle wiederaufladbaren Batterien sollten nicht mit dem GreenLED-Griff verwendet werden.

## Wie kann ich den GreenLED-Griff reinigen?

Die äußere Hülse ist komplette autoklavierbar, wenn sie vom inneren Einsatz entfernt wird. Der innere Einsatz sollte nicht autoklaviert werden; wischen Sie ihn leicht mit einem trockenen Tuch ab, wobei Sie vorsichtig sein müssen, damit das LED nicht zerkratzt wird.

## Produktangaben:

Bestell-Code	Produkt	Beschreibung
4215	GreenLED-Griff	GreenLED ergonomischer Griff mit Batterie-Einsatz
	Sets mit Griff und Spatel auf Anfrage	Sets mit 3 oder 4 Macintosh- oder Miller-GreenSpec™-Spateln, mit einem GreenLED-Griff und Batterie-Einsatz

## Über Truphatek:

Truphatek wurde 1987 gegründet und ist ein führender Anbieter von Atemweg-Management und medizinischen Notfall-Geräten. Unsere Mission ist es, laufend neuartige, patentierbare medizinische Geräte für globales Marketing zu entwickeln.

Unser High-Tech-Design steht niedrigen Kosten und hochwertigen Produktionsmöglichkeiten gegenüber. Das umfangreiche Angebot von Einweg- und wiederverwendbaren Laryngoskop-Produkten des Unternehmens hat einen ausgezeichneten Ruf in der ganzen Welt.

### Garantie-Statement von Truphatek

Alle Truphatek-Produkte garantieren bedingungslos hohe Qualität, und dass es keine Herstellungsfehler beim Material und der Ausführung gibt. Das gilt für 5 Jahre ab Herstellungsdatum.

Ein Ersatzprodukt wird gratis für jegliches Truphatek-Produkt zur Verfügung gestellt, das diese Garantie nicht einhält. Der komplette Text „Garantie von Truphatek“ kann auf unserer Website [www.truphatek.com](http://www.truphatek.com) angesehen oder über den Kundenservice [www.helpdsk@truphatek.com](mailto:helpdsk@truphatek.com) angefordert werden.

Bei GreenLED, GreenSpec und Truphatek™ handelt es sich um **Markenzeichen von Truphatek International Ltd. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herstellers nicht verwendet werden.**



Vertrieb - Händler

GLH 01-03/11 Rev 1



[www.truphatek.com](http://www.truphatek.com)

Truphatek International Ltd.  
POB 8051 Netanya 42504, Israel  
Tel: +972-9-8851155, Fax: +972-9-8851212  
[helpdsk@truphatek.com](mailto:helpdsk@truphatek.com)

© 2011 Truphatek International. Alle Rechte vorbehalten.