

Empfehlungen zur Reinigung und Desinfektion von Agilia Infusionspumpen



Wann?

- Nach jeder Anwendung am Patienten.
- Vor einem neuen Einsatz/Wartungsarbeiten/Service/Reparaturen.

Warum?

- Um die Geräteinstandhaltung zu unterstützen.
- Gewährleistung der Sauberkeit und Hygiene.

Wie?

- 1 Bereiten Sie eine Desinfektions-/Reinigungslösung vor*.
- 2 Trennen Sie das Gerät vom Netz.
- 3 Benutzen Sie Einweghandschuhe, ggf. Einwegtücher und eine hygienisch saubere Arbeitsfläche.
- 4 Befeuchten Sie das Tuch mit der Desinfektions-/Reinigungslösung, wringen Sie das Tuch gut aus. Wiederholen Sie dies bei jedem Arbeitsschritt.
- 5 Beginnen Sie die Reinigung mit der Stellfläche des Gerätes, drehen Sie es dann vorsichtig um.
- 6 Reinigen Sie nun beide Seiten des Gerätes, ohne die geräterückseitigen Anschlüsse zu benetzen.
- 7 Wischen Sie die Tastatur ab.
- 8 Reinigen Sie zuletzt die mechanischen Komponenten (Spritzenflügelaufnahme, Spritzenkolbenhalter, Spritzenniederhalter).
- 9 Lassen Sie das Gerät trocknen.
- 10 Schützen Sie das Gerät bis zum nächsten Einsatz vor weiterer Verschmutzung.

* **BITTE BENUTZEN SIE NICHT:** TRICHLORÄTHYLEN-DICHLORÄTHYLEN - AMMONIAK - AMMONIUM CHLORID (SALMIAK) - CHLOROFORM und HYDROCARBON - ÄTHYLEN DICHLORID-METHYLENCHLORID - AZETON - Terralin 5 %, Mikrobac 2.5 %, Dismozon 4 %, Alkohol (Ethanol 95 %). Diese aggressiven Mittel können die Kunststoffteile beschädigen und zu Fehlfunktionen führen. Vorsicht ist auch bei ALKOHOL basierenden SPRAYS geboten (20 % - 40 % Alkohol). Sie können Haarrisse im Kunststoffgehäuse verursachen und bieten keine ausreichende Desinfektion vor der Reinigung.
EMPFEHLUNG: ANIOS Surface haute DDSH, ANIOS Surface Safe, ECO LAB Asepti Neutral Wipes, ECOLAB Asepti wipes II (isopropyl Alcohol), AQUA 100, ECOLAB Incidine special spray, ECOLAB Vaposol, Henkel Ecolab Incidin Plus 2 %. Diese Mittel sind in Verbindung mit Agilia Geräten positiv getestet.

