

Modelle VS 9/8

Vitalfunktionsmonitor Kurzanleitung

Hinweis: Die Kurzanleitung soll keinen Ersatz für das Bedienungshandbuch darstellen. Lesen Sie vor dem Betrieb des Geräts das Bedienungshandbuch sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen, um die Sicherheit von Bediener, Patient und Gerät zu gewährleisten.

Übersicht



- | | | | |
|---|--|---|----------------------------------|
| 1 | NIBP-Manschettenbuchse | 6 | Taste „Alarm zurücksetzen/Pause“ |
| 2 | SpO ₂ -Kabelanschluss | 7 | Taste „NIBP Start/Stop“ |
| 3 | CO ₂ -Ausgang | 8 | Patientenaufnahme-Taste |
| 4 | Anschluss CO ₂ -Probenahmeleitung | 9 | Drehregler |
| 5 | Betriebsschalter | | |

Schnellasten

Symbol	Funktion
 Trend	Öffnet das Menü Trend .
 Speich.	Speichert die eingegebenen Informationen.
 Hauptmenü	Öffnet das Hauptmenü.

Symbol	Funktion
 Patient	Zeigt die Patientenliste an.
 Löschen	Löscht die eingegebenen Informationen.
 Weitere	Zeigt weitere Schnellasten an.

Symbol	Funktion
 Weiter	Zeigt den nächsten Bildschirm an. (Sie können auch auf dem Hauptbildschirm nach oben wischen, um zum nächsten Bildschirm zu gelangen.)
 Alarm pausieren	Pausiert die physiologischen Alarme.
 Zielwert	Öffnet den Bildschirm Zielwert .

Symbol	Funktion
 Zurück	Zeigt den vorherigen Bildschirm an. (Sie können auch auf dem Hauptbildschirm nach unten wischen, um zum vorherigen Bildschirm zu gelangen.)
 Alarm zurücks.	Setzt das Alarmsystem zurück.

Einschalten des Monitors

Drücken Sie den Betriebsschalter, um den Monitor einzuschalten.

Auswählen eines Workflows

Wählen Sie  oben links im Bildschirm, um einen Workflow auszuwählen.

- Wählen Sie unter **Spot-Check** einen Workflow aus, der Monitor arbeitet anschließend im Modus **Spot-Check**.
- Wählen Sie unter **Kontinuierliche Überwachung** einen Workflow aus, der Monitor arbeitet anschließend im Modus **Kontinuierliche Überwachung**.

Anmelden als Arzt

1. Wählen Sie die Option  in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.
2. Geben Sie **Arzt** und das **Kenntwort** ein (falls erforderlich).
3. Drücken Sie **Anmelden**.

Wenn Sie einen Barcodeleser an Ihren Monitor anschließen, können Sie zum Anmelden Ihren Barcode oder RFID-Code scannen.

Aufnehmen eines Patienten

1. Wählen Sie die Schnell Taste .
2. Wählen Sie in unter **Lokale Patientenliste** oder **ADT-Datenbank** einen Patienten und dann **Aufnehmen** aus.
3. Bearbeiten Sie die Patienteninformationen nach Bedarf. Wählen Sie **OK**.

Wenn Sie einen Barcodeleser an Ihren Monitor anschließen, können Sie den Barcode des Patienten scannen, um die Patientennummer einzugeben.

NIBP messen

- Wählen Sie , um die Position des Patienten und die Messstelle einzustellen.
- Wählen Sie , um mit der Messung zu beginnen.
- Wählen Sie im Modus **Kontinuierliche Überwachung** den NIBP-Bereich aus, um das NIBP-Menü aufzurufen.
- Wenn ... unten im NIBP-Bereich angezeigt wird, wischen Sie von links nach rechts, um einen weiteren Bildschirm anzuzeigen.

Messung der Temperatur

- P/M: P steht für **Vorhersage**modus („P“ für „Predictive“) und M steht für den Modus **Monitor** (SmarTemp).
-  : zeigt die aktuelle Messstelle an.
-  : Wählen Sie diese Option, um einen gemessenen Temperaturwert manuell einzugeben.

Manuelle Eingabe des RR-Werts

1. Wählen Sie im Resp-Bereich  oder  . Ein Timer wird angezeigt und die Zeit beginnt zu laufen.
2. Zählen Sie die Gesamtzahl der Atemzüge des Patienten in der letzten Minute.
3. Geben Sie die Anzahl ein und wählen Sie .

Manuelle Eingabe von Parametern

Wählen Sie einen Parameter in der Liste aus, und geben Sie die Informationen wie unten beschrieben ein:

-  : Wählen Sie diese Option, um einen Wert einzugeben.
-  : Wählen Sie diese Option, um die Optionen anzuzeigen.

Speichern von Daten

1. Wählen Sie die Schnelltaste , um die physiologischen Daten des aktuellen Patienten zu speichern.
2. Überprüfen Sie, ob die erforderlichen Daten korrekt gemessen oder eingegeben wurden. Wählen Sie **OK**

Hinweis: Möglicherweise müssen Sie auf dem Hauptbildschirm nach oben wischen oder die Schnelltaste  drücken, um die Schnelltaste  anzuzeigen.

Alarmer

Alarmstatus-Symbole

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Alle Alarmer sind auf „Pause“ gesetzt.		Akustische Alarmtöne sind auf „Pause“ gesetzt.
	Akustische Alarmsignale sind ausgeschaltet.		Alarmer wurden quittiert, und Alarm-System wurde zurückgesetzt.
	Einzelne physiologische Alarmer sind deaktiviert sind oder das System befindet sich im Status „Alarm aus“.		

Pausieren von Alarmen/Pausieren von Alarmtönen

- Wählen Sie die Schnelltaste  , um die Alarmer bzw. Alarmtöne zu pausieren/ fortzusetzen.
- Beim Modell VS 8 können Sie die Taste **Alarm zurücksetzen/Pause** gedrückt halten, um Alarmer oder Alarmtöne zu pausieren bzw. fortzusetzen.

Zurücksetzen von Alarmen

Durch Drücken der Schnelltaste  werden die anhängigen Alarmer quittiert, und das Alarmsystem wird zurückgesetzt.

Einschätzen von Trends

Wählen Sie die Schnelltaste  , um Trends, Bewertungen und Ereignisse zu überprüfen.

